



鼻腔と口腔から楽々採取できるから幼児・お年寄りにも優しい

自己検体採取専用コンボスワブ

SelTM

安全そして簡単に採取

鼻咽頭まで入れる必要のない優しく新しい検体採取ソリューション

コンボスワブ SelTM

SelTMは、鼻腔と口腔から検体を採取する使いやすいスワブです。

Safe & Easy

- 鼻腔と口腔から検体を採取するから痛くない
- 自己検体採取専用だから
 - 専門家が同席した環境で個人で採取可能
 - 専門家による採取可能



Reliable

- 専門家採取の一般スワブと比較したデータ


96.7% 結果一致

- 検体最大保存は6日間



Efficient

- 検体採取に必要な労力と人員が少なくて済みます
- 大量検体採取にも適しています

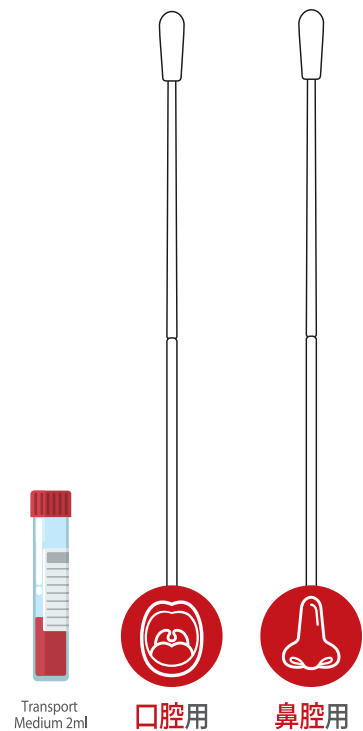

自己検体採取の場合のクイックガイド

01

ポーチを開き、使用するスワブの尻尾を持ちます。

02

1本目で口腔を5回こすりします。
2本目で鼻腔を10回こすりします。

03

採取したスワブを折って
運送用チューブに入れます。

04

キャップを
強く閉めます。



Tel: +82-2-2240-4000 / E-mail: info@seegene.com

www.seegene.com



<http://www.jmp-inc.jp>

Seegene Inc.
Seoul, Republic of Korea

BRAZIL
Belo Horizonte, Brazil

CANADA
Toronto, Canada

GERMANY
Düsseldorf, Germany

日本メディポート株式会社

MEXICO
Mexico city, México

MIDDLE EAST
Dubai, UAE

ITALY
Genova GE, Italy

USA
California, USA

〒005-0004 札幌市南区澄川4条1丁目1-40 澄川ビル4F-B
Tel: 011-299-6711 / Fax: 011-299-6712